



Smartphone Electrocardiogram Recorder

Instalar la aplicación HEART INFORM



Smartphone o tableta Android 12 o superior con Bluetooth.

Visita <https://HeartInform.com>.
Haz clic en el botón de Google Play.
Idiomas: EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, ZH.

Registrar un nuevo ECG


Respuesta de emergencia

Correas reutilizables para muñecas y tobillos.
Aplique una pequeña cantidad (aproximadamente del tamaño de un guisante) de gel para electrodos en la parte interior de ambas muñecas y el tobillo izquierdo.
Apriete las correas lo suficiente para que los electrodos metálicos entren en contacto con la piel.

Electrocardiograma diagnóstico

Coloque los electrodos desechables como se muestra.

Conecte los cables de Heart Inform:
NEGRO - muñeca izquierda/lateral
BLANCO - muñeca derecha/lateral
ROJO - tobillo izquierdo/lateral

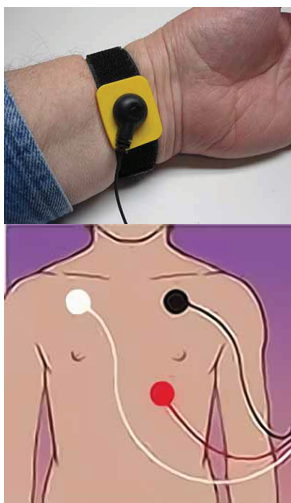

Encienda el digitalizador HEART INFORM.

Abra la aplicación HEART INFORM. Pulse el botón **Nuevo ECG**.

Introduzca el nombre del paciente e información opcional, como su ID, síntomas y anotaciones.

Comandos de grabación

- ✱ Conecte el digitalizador Bluetooth HEART INFORM
El LED rojo se encenderá fijo al conectarlo
- Inicie la grabación de un nuevo ECG
Pulsación corta: Grabación de 30 segundos
Pulsación larga: Grabación continua (Holter) hasta que se detenga
- Fin de la grabación y visualización del resumen de arritmias del ECG
- ▶ Avanzar a la siguiente irregularidad.

Apague el digitalizador HEART INFORM al terminar.
La batería de iones de litio CR2032 es fácil de reemplazar.


Detección de arritmias cardíacas

La forma de onda del ECG con marcadores de arritmia se muestra en tiempo real.

Marcador **VERDE** = pulso normal.

Marcador **AZUL** = pulso de fibrilación auricular que se produce antes o después del tiempo normal.

Marcador **ROJO** = pulso de fibrilación ventricular con una forma anormal.

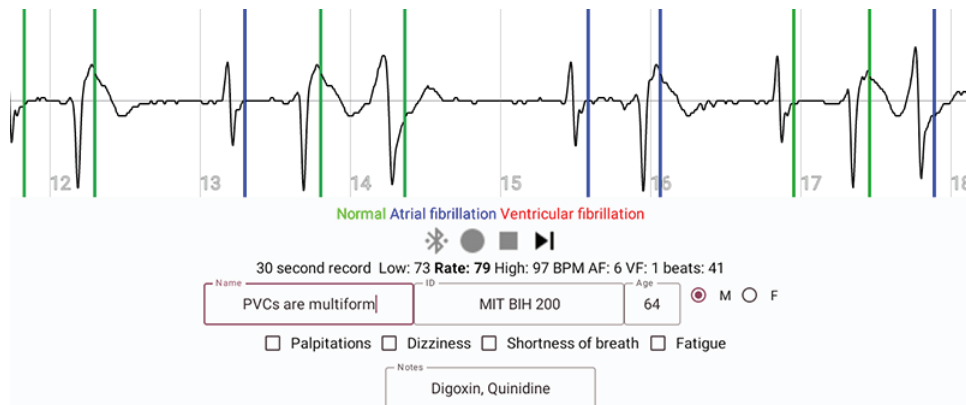

Cuando finaliza la grabación del ECG se muestra un resumen de la arritmia cardíaca.

Resultados OK

No se detectaron latidos irregulares

Fibrilación auricular

Envíe este ECG para una evaluación adicional

Fibrilación ventricular

¡BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA!
**LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR
ES PONDERABLE PARA LA VIDA**

Reproducir un ECG existente

Haga clic en el ECG deseado de la lista de la base de datos.

Un clic prolongado le permite eliminar un ECG no deseado.

Los campos de información del paciente se pueden editar en cualquier momento.

Comandos de reproducción

- ◀ Volver al inicio del ECG.
- ▶ Reproducir el ECG desde el punto actual.
- ⏸ Pausar la reproducción.
- ▶ Avanzar a la siguiente irregularidad.
- 📄 Guardar ECG en PDF (imprimir, Email, WhatsApp)

HeartInform@gmail.com

<https://HeartInform.com>