



Smartphone Electrocardiogram Recorder

Installer l'application HEART INFORM



Smartphone ou tablette Bluetooth Android 12+.
Rendez-vous sur <https://HeartInform.com>.
Cliquez sur Google Play.
Langues : EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, ZH.

Enregistrer un nouvel ECG

Intervention d'urgence


Sangles réutilisables pour poignets et chevilles.
Appliquez une petite quantité (environ la taille d'un petit pois) de gel pour électrodes à l'intérieur des deux poignets et de la cheville gauche.

Serrez les sangles juste assez pour que les électrodes métalliques soient en contact avec la peau.

Électrocardiogramme diagnostique

Placez les électrodes jetables comme indiqué.

Connectez les fils Heart Inform :
NOIR - poignet gauche / côté
BLANC - poignet droit / côté
ROUGE - cheville gauche / côté

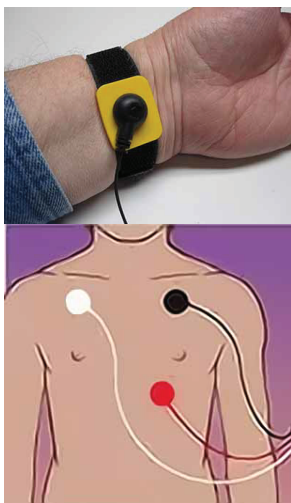

Activez le numériseur HEART INFORM.

Lancez l'application HEART INFORM. Appuyez sur le bouton **Nouvel ECG**.
Saisissez le nom du patient et des informations facultatives, notamment son identifiant, ses symptômes et ses notes.

Enregistrer les commandes

- ✱ Connecter le numériseur Bluetooth HEART INFORM
La LED rouge reste allumée en continu une fois la connexion établie.
- Commencer l'enregistrement d'un nouvel ECG.
Appui court : enregistrement de 30 secondes.
Appui long : enregistrement continu (Holter) jusqu'à l'arrêt.
- Terminer l'enregistrement et afficher le résumé de l'arythmie ECG.
- ▶ Passer à l'irrégularité suivante.

Éteignez le numériseur HEART INFORM une fois terminé.
La pile Li-ion CR2032 est facile à remplacer.


Détection d'arythmie cardiaque

L'onde ECG avec les marqueurs d'arythmie est affichée en temps réel.

Marqueur **VERT** = pouls normal.

Marqueur **BLEU** = pouls de fibrillation auriculaire survenant avant ou après l'heure normale.

Marqueur **ROUGE** = pouls de fibrillation ventriculaire de forme anormale.

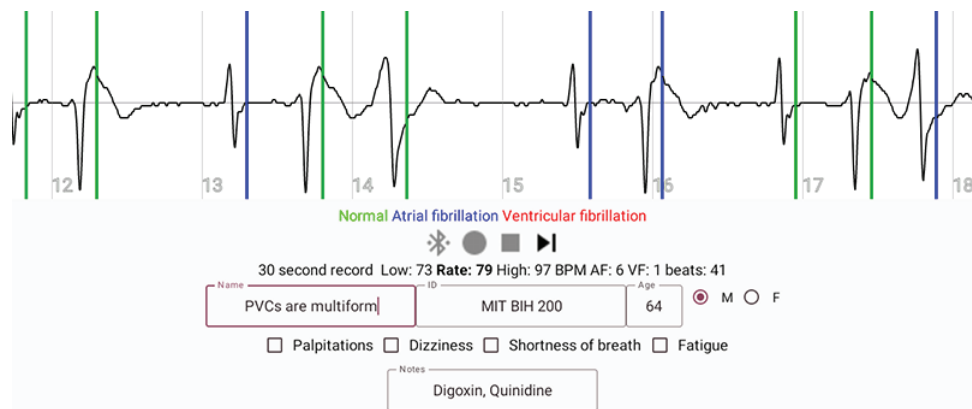

Un résumé de l'arythmie cardiaque s'affiche lorsque l'enregistrement ECG est terminé.

Résultats OK

Aucun battement irrégulier n'a été détecté

Fibrillation auriculaire

Envoyez cet ECG pour une évaluation supplémentaire

Fibrillation ventriculaire

CONSULTEZ UN MÉDECIN !

**LA FIBRILLATION VENTRICULAIRE
METTE LA VIE EN DANGER**

Lire un ECG existant

Cliquez sur l'ECG souhaité dans la liste de la base de données.

Un clic long permet de supprimer un ECG indésirable.

Les champs d'informations patient peuvent être modifiés à tout moment.

Commandes de lecture

- ◀ Retour au début de l'ECG.
- ▶ Lecture de l'ECG à partir du point actuel.
- ⏸ Pause lecture.
- ▶ Avancer jusqu'à l'irrégularité suivante.
- 📄 Enregistrer l'ECG au format PDF (impression, e-mail, WhatsApp)

HeartInform@gmail.com

<https://HeartInform.com>