

HEART INFORM

Smartphone Electrocardiogram Recorder

HEART INFORM एप्लिकेशन इंस्टॉल करें



Android 12+ ब्लूटूथ स्मार्टफोन, टैबलेट।
<https://HeartInform.com> पर जाएं।
Google Play बटन पर क्लिक करें।
भाषाएँ: EN, DE, ES, FR, HI, IT, JA, KO, ZH।

एक नया ईसीजी रिकॉर्ड करें

आपातकालीन प्रतिक्रिया

पुनः प्रयोज्य कलाई/टखने की पट्टियाँ।

दोनों कलाईयों और बाएँ टखने के अंदरूनी हिस्से पर थोड़ी मात्रा (लगभग

मटर के दाने के बराबर) इलेक्ट्रोड जेल लगाएँ।

पट्टियों को इतना कसकर बाँधें कि धातु के इलेक्ट्रोड त्वचा से संपर्क में आ सकें।

डायग्नोस्टिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
दियाए गए अनुसार डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड लगाएँ।

हृदय सूचना तारों को जोड़ें:

काला - बाएँ कलाई/तरफा

सफेद - दाएँ कलाई/तरफा

लाल - बायाँ टखना / बाजू

HEART INFORM डिजिटाइज़र चालू करें।

HEART INFORM एप्लिकेशन लॉन्च करें। नया ECG बटन दबाएँ।

मरीज का नाम और वैकल्पिक जानकारी दर्ज करें

जिसमें पहचान पत्र, कोई भी लक्षण और नोट्स शामिल हों।

आदेश रिकॉर्ड करें

- ✱ HEART INFORM ब्लूटूथ डिजिटाइज़र कनेक्ट करें
कनेक्ट होने पर लाल एलईडी लगातार चालू रहेगी
- एक नया ईसीजी रिकॉर्ड करना शुरू करें
थोड़ा दबाएँ: 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग
लंबा दबाएँ: रुकने तक निरंतर (होल्टर) रिकॉर्डिंग
- रिकॉर्डिंग समाप्त करें और ईसीजी अतालता सारांश प्रदर्शित करें
- ▶ अगली अनियमितता पर आगे बढ़ें।

काम पूरा होने पर HEART INFORM डिजिटाइज़र बंद कर दें।

CR2032 Li-ion बैटरी को बदलना आसान है।


हृदय अतालता का पता लगाना
अतालता मार्करों के साथ ईसीजी तरंग वास्तविक समय में प्रदर्शित होती है।

हरा मार्कर = सामान्य नाड़ी।

नीला मार्कर = आलदि फब्रिलेशन पल्स जो होता है

सामान्य समय से पहले या बाद में।

लाल मार्कर = असामान्य आकार वाला वेंट्रिकुलर फब्रिलेशन पल्स।

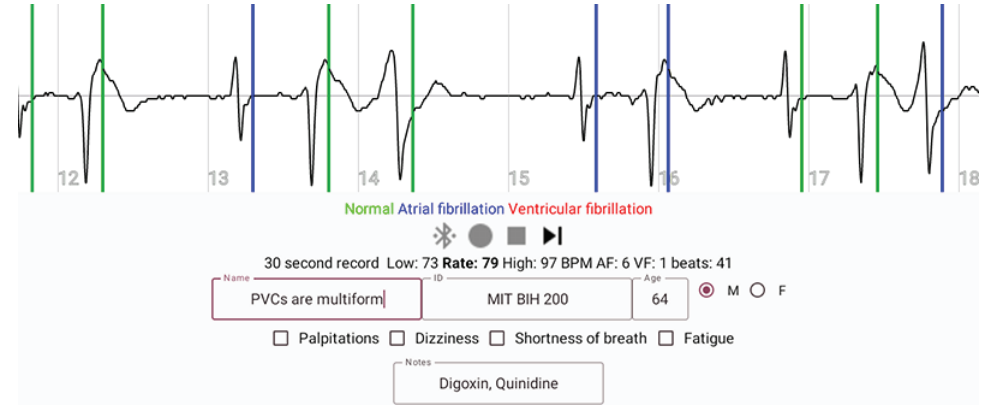

ईसीजी रिकॉर्डिंग समाप्त होने पर हृदय अतालता का सारांश दिखाया जाता है।

परिणाम ठीक हैं

कोई अनियमित धड़कन नहीं पाई गई

दिल की अनियमित धड़कन

इस ईसीजी को अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए भेजें

वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन

चिकित्सा सहायता ले!

वेंट्रिकुलर फब्रिलेशन

जीवन के लिए खतरा है

मौजूदा ईसीजी प्लेबैक करें

डेटाबेस सूची से वांछित ईसीजी पर क्लिक करें।

एक लंबा क्लिक आपको अवांछित ईसीजी को हटाने की अनुमति देता है।

रोगी सूचना फ़ील्ड को किसी भी समय संपादित किया जा सकता है।

प्लेबैक कमांड

- ◀ ईसीजी की शुरुआत पर वापस जाएँ।
- ▶ वर्तमान बिंदु से ईसीजी प्लेबैक करें।
- || प्लेबैक रोकें।
- ▶ अगली अनियमितता पर जाएँ।
- PDF ईसीजी पीडीएफ सहेजें (प्रिंट करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें)

HeartInform@gmail.com

<https://HeartInform.com>