



Smartphone Electrocardiogram Recorder

Installa l'applicazione **HEART INFORM**



Smartphone e tablet Android 12+ Bluetooth.

Vai su <https://HeartInform.com>.

Clicca sul pulsante Google Play.

Lingue: EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, ZH.

Registra un nuovo ECG

Risposta alle emergenze

Fascette riutilizzabili per polso/caviglia.

Applicare una piccola quantità (circa la dimensione di un pisello) di gel per elettrodi sulla parte interna di entrambi i polsi e della caviglia sinistra.

Allacciare le fascette quanto basta per far sì che gli elettrodi metallici siano a contatto con la pelle.

Elettrocardiogramma diagnostico


Posizionare gli elettrodi monouso come mostrato.

Collegare i fili Heart Inform:

NERO - polso/lato sinistro

BIANCO - polso/lato destro

ROSSO - caviglia/lato sinistro

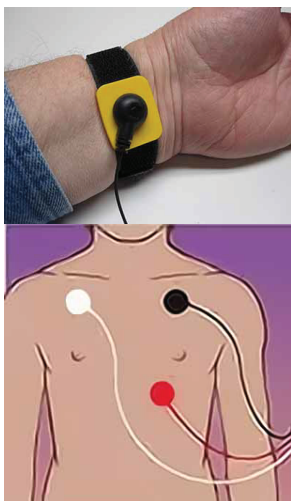

Accendere il digitalizzatore HEART INFORM.

Avviare l'applicazione HEART INFORM. Premere il pulsante **Nuovo ECG**.

Inserire il nome del paziente e informazioni facoltative, tra cui ID, eventuali sintomi e note.

Registra i comandi

- ✱ Collega il digitalizzatore Bluetooth HEART INFORM
Il LED rosso rimarrà acceso fisso una volta connesso
- Avvia la registrazione di un nuovo ECG
Pressione breve: registrazione di 30 secondi
Pressione prolungata: registrazione continua (Holter) fino all'interruzione
- Termina la registrazione e visualizza il riepilogo delle aritmie ECG
- ▶ Passa all'irregolarità successiva.

Spegnere il digitalizzatore HEART INFORM al termine dell'operazione.

La batteria agli ioni di litio CR2032 è facile da sostituire.


Rilevazione dell'aritmia cardiaca

La forma d'onda ECG con i marcatori di aritmia viene visualizzata in tempo reale.

Marcatore **VERDE** = polso normale.

Marcatore **BLU** = polso di fibrillazione atriale che si verifica prima o dopo il tempo normale.

Marcatore **ROSSO** = polso di fibrillazione ventricolare con forma anomala.

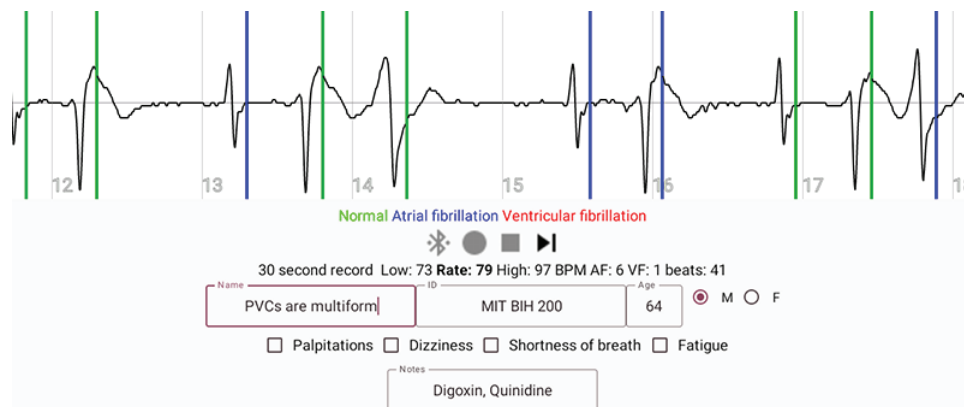

Al termine della registrazione ECG viene visualizzato un riepilogo delle aritmie cardiache.

Risultati OK

Non sono stati rilevati battiti irregolari

Fibrillazione atriale

Invia questo ECG per una valutazione aggiuntiva

Fibrillazione ventricolare

CONSULTARE UN MEDICO!

**LA FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
È PERICOLOSA PER LA VITA**

Riprodurre un ECG esistente

Clicca sull'ECG desiderato dall'elenco del database.

Un clic prolungato consente di eliminare un ECG indesiderato.

I campi relativi alle informazioni sul paziente possono essere modificati in qualsiasi momento.

Comandi di riproduzione

- ◀ Torna all'inizio dell'ECG.
- ▶ Riproduci l'ECG dal punto corrente.
- ⏸ Metti in pausa la riproduzione.
- ▶ Avanza all'irregolarità successiva.
- 📄 Salva ECG PDF (stampa, e-mail, WhatsApp)

HeartInform@gmail.com

<https://HeartInform.com>