

HEART INFORM

Smartphone Electrocardiogram Recorder

HEART INFORM 앱 설치



Android 12 이상 블루투스 스마트폰, 태블릿.
https://HeartInform.com으로 이동하세요.
Google Play 버튼을 클릭하세요.
지원 언어: 영어, 독일어, 스페인어, 프랑스어,
이탈리아어, 일본어, 한국어, 독일어

새로운 ECG를 기록하세요

비상 대응

재사용 가능한 손목/발목 스트랩.
완두콩 크기 정도의 소량의 전극 젤을
양쪽 손목과 왼쪽 발목 안쪽에 바릅니다.
금속 전극이 피부에 닿을 정도로만 스트랩을 단단히
고정합니다.

진단용 심전도

그림과 같이 일회용 전극을 부착하세요.

심장 정보 전선을 연결하세요.
검정색 - 왼쪽 손목 / 옆구리
흰색 - 오른쪽 손목 / 옆구리
빨간색 - 왼쪽 발목 / 옆구리

HEART INFORM 디지털타이저를 켜세요.

HEART INFORM 애플리케이션을 실행하세요. 새 ECG 버튼을 누르세요.

환자 이름과 선택 정보를 입력하세요.

신분증, 증상 및 메모를 포함합니다.

명령 기록

- ※ HEART INFORM 블루투스 디지털타이저를 연결하세요.
연결되면 빨간색 LED가 계속 켜져 있습니다.
- 새로운 심전도(ECG) 기록을 시작합니다.
짧게 누름: 30초 기록
길게 누름: 정지할 때까지 연속(홀터) 기록
- 기록을 종료하고 심전도 부정맥 요약을 표시합니다.
- ▶ 다음 부정맥으로 넘어갑니다.

작업이 끝나면 HEART INFORM 디지털타이저를 끄세요.
CR2032 리튬 이온 배터리는 쉽게 교체할 수 있습니다.


심장 부정맥 감지

부정맥 마커가 포함된 ECG 파형이 실시간으로 표시됩니다.

녹색 마커 = 정상 맥박.

파란색 마커 = 정상 시간 전후에 발생하는 심방세동 맥박.

빨간색 마커 = 비정상적인 형태의 심실세동 맥박.

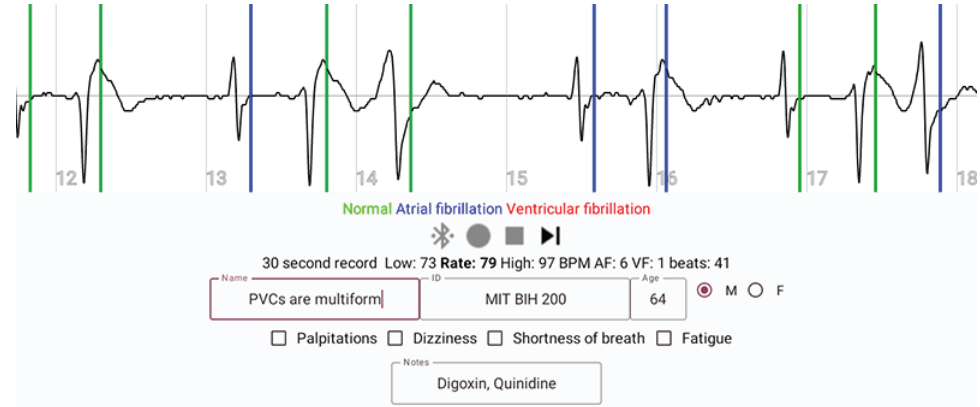

ECG 기록이 끝나면 심장 부정맥 요약이 표시됩니다.

결과 확인

불규칙한 비트가 감지되지 않았습니다.

심방세동

추가 평가를 위해 이 ECG를 보내주세요.

심실세동

병원에 가세요!

심실세동
은 생명을 위협합니다

기존 ECG 재생

데이터베이스 목록에서 원하는 ECG를 클릭하세요.

길게 클릭하면 원하지 않는 ECG를 삭제할 수 있습니다.

환자 정보 필드는 언제든지 편집할 수 있습니다.

재생 명령

- ◀◀ 심전도 시작 부분으로 돌아갑니다.
- ▶▶ 현재 지점부터 심전도를 재생합니다.
- || 재생을 일시 정지합니다.
- ▶ 다음 불규칙 지점으로 이동합니다.
- PDF ECG PDF 저장(인쇄, 이메일, WhatsApp)

HeartInform@gmail.com

https://HeartInform.com